


Technisches Datenblatt

MaiMed[®] MyClean DS OA Flowpack

Desinfektionstücher ohne Alkohol

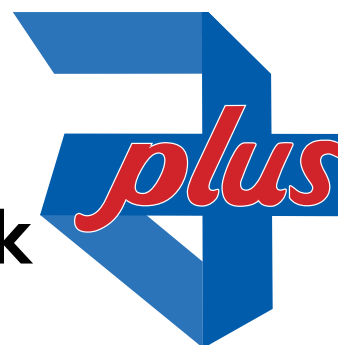

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen (auch Acrylglas)
- Tränkflüssigkeit wirkt bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen behüllte Viren z. B. HIV, HBV, HCV sowie Influenza-/Grippe-Viren)
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Gute Reinigungsleistung
- Gute Benetzung
- Schnelle Auftrocknung
- Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet



Anwendung: Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit MaiMed[®] MyClean DS OA Flowpack benetzen, dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nach Gebrauch gut verschließen.

Ausführung: MaiMed[®] MyClean DS OA Flowpack

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	28 x 30 cm	48 Blatt	79664	4046153122387	11887207	10 Pack
Desinfektionstücher	20 x 20 cm	80 Blatt	79764	4046153134601	16913263	12 Pack

Einwirkzeiten:

Wirksamkeit der Tränklösung gem. EN-Normen und DGHM/VAH	
Bakterizidie (EN 13727, EN 16615 – 4-Felder-Test), Levurozidie (EN 13624, EN 16615 – 4-Felder-Test; hohe Belastung):	1 Minute
Viruswirksamkeiten der Tränklösung (EN 14476)	
Begrenzt viruzid PLUS:	1 Stunde
Begrenzt viruzid:	1 Minute
Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV; hohe Belastung):	1 Minute
Noro-Viren (hohe Belastung):	30 Minuten
Adeno-Viren (hohe Belastung):	1 Stunde

Zusammensetzung: In 100 g Tränklösung sind enthalten: Wirkstoffe: 0,1 g 2-Phenoxyethanol; 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

eClass: 30-30-90-06

Verwendbarkeit: 2 Jahre

Halbbarkeit nach Anbruch: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:



MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MaiMed[®] MyClean-DS-OA-Flowpack-202102